



APRESENTAÇÃO

Cartucho com 1 bisnaga 30g de gel + 10 aplicadores descartáveis
USO ADULTO

INFORMAÇÕES

O que é Vagidrat®?
Vagidrat® é um gel hidratante intravaginal que restaura naturalmente a umidade vaginal, que dura até 3 dias após cada aplicação.
Vagidrat® elimina as células epiteliais secas, e quando usado regularmente, restabelece a umidade vaginal natural.


Quais as vantagens do uso de Vagidrat®?
Vagidrat® não contém hormônios.
Vagidrat® contém a quantidade exata a ser aplicada.
Vagidrat® é um gel hidratante intravaginal, que proporciona umidade (hidratação) contínua por até três dias. Isto ajuda a eliminar as células epiteliais secas e, quando usado regularmente, restabelece sua umidade natural; ao contrário de um lubrificante tradicional que fornece lubrificação provisória somente para reduzir o atrito durante a relação sexual.
Vagidrat® fará com que a relação sexual seja mais confortável, restaurando a umidade vaginal.
Vagidrat® pode ser usado com preservativos.
Vagidrat® não contém fragrância, não contém parabenos, não possui sabor e não é agressivo.

Quando utilizar Vagidrat®?
É recomendado uma única aplicação aproximadamente a cada 2 ou 3 dias.

Qual a composição de Vagidrat®?
Vagidrat® é um gel que contém: ácido poliacrílico, água, carbômero, glicerina, hidróxido de sódio, DMDM hidantoína e iodopropinil butilcarbamato.

Quem pode utilizar Vagidrat®?
Mulheres que necessitam de hidratação vaginal.

Como utilizar Vagidrat®?
1) Puxe o êmbolo do aplicador destravando-o e deslize até o limite máximo que localiza-se na metade do aplicador;
2) Destampe a bisnaga e utilize a ponta da tampa para perfurar vagarosamente o lacre da bisnaga, sem apertar;
3) Encaixe o aplicador na bisnaga já com o êmbolo destravado mantendo o espaço livre para o preenchimento do gel;
4) Pressione suavemente a bisnaga até que o gel preencha todo o espaço livre. **ATENÇÃO:** o espaço livre corresponde a aproximadamente metade do aplicador. Não continue pressionando a bisnaga para não desperdiçar o produto;
5) Deitada e com as pernas flexionadas, introduza cuidadosamente o aplicador na vagina de forma profunda e confortável. Empurre o êmbolo totalmente até liberar todo o gel. Remova o aplicador e descarte.

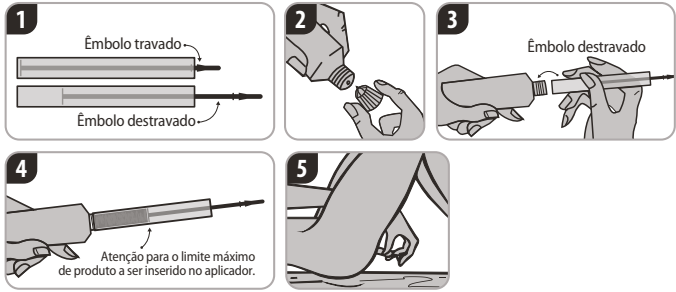

Vagidrat® pode ser usado antes da relação sexual?
Sim, porém, Vagidrat® tem melhor resultado, quando usado de forma regular e não apenas antes da relação sexual; isto porque Vagidrat® restabelece a umidade vaginal, proporcionando dias e noites confortáveis, tornando assim a relação mais espontânea.

Como sei que estou utilizando a quantidade correta de Vagidrat®?
O aplicador de Vagidrat® foi desenvolvido para depositar a quantidade recomendada do produto.

Por quanto tempo deve-se utilizar Vagidrat®?
Não existe tempo determinado para uso de Vagidrat®. Recomenda-se o uso a longo prazo.

Quais as precauções para utilização de Vagidrat®?
Manter o produto fora do alcance das crianças.
Somente para uso intravaginal.
Se ocorrer irritação, interrompa o uso. Se persistirem os sintomas, contate seu médico.
Não é recomendado o uso no período menstrual.
Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.
Não utilizar após a data da expiração impressa na embalagem.
Utilização sob supervisão médica.

Como Vagidrat® deve ser armazenado?
Mantenha fora do alcance das crianças.
Conservar o produto em temperatura ambiente entre 15 e 30°C, e protegido da luz, calor e umidade.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade – Vide cartucho.
Registro M.S: 80214950006

Resp. Técnico:
Carlos Alexandre de Oliveira Ferrari
CRF nº 39.554
Reg. ANVISA: 80214950006

Fabricado por:
Ativus Farmacêutica Ltda
Unidade Fabril:
Rua Fonte Mécia, 2050
Caixa Postal 489
CEP: 13.273-900 – Valinhos / SP
CNPJ 64.088.172/0003-03
Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:
SAC: 0800 7712010

Distribuído por:
Teva Farmacêutica Ltda
Av. Guido Caloi, 1935
Prédio B - 1º Andar
São Paulo - SP
CNPJ 05.333.542/0001-08



código interno BU-03
200157 - 128x230mm - 5.15(A)

Folheto Vagidrat

Faca: L230xA128mm
Código do item: 200157
Revisão do item: 5.15 (A)
Data: 13/05/2015
Pharmacode: 110010010 (192)

Cores:

Observações
Descrição de todas as alterações feitas em relação à versão anterior.
Alteração de layout do Pharmacode.