

MINIBULA LUBRINAT

LUBRINAT GEL HIDRATANTE INTRAVAGINAL - Apresentação: Cartucho com bisnaga de 30g de gel + 10 aplicadores descartáveis. Cartucho com bisnaga de 10g de gel + 3 aplicadores descartáveis de amostra grátis. USO ADULTO. INFORMAÇÕES: Lubrinat é um hidratante intravaginal na forma de gel que restaura naturalmente a umidade vaginal, com duração de até 3 dias após cada aplicação. Lubrinat elimina as células epiteliais secas e, quando usado regularmente, restabelece a umidade vaginal natural. Vantagens do uso de Lubrinat: Lubrinat não contém hormônios. Lubrinat contém a quantidade exata a ser aplicada. Lubrinat é um hidratante intravaginal, que proporciona umidade (hidratação) contínua por até três dias. Isto ajuda a eliminar as células epiteliais secas e, quando usado regularmente, restabelece a umidade natural; ao contrário de um lubrificante tradicional que fornece lubrificação provisória somente para reduzir o atrito durante a relação sexual. Lubrinat fará com que a relação sexual seja mais confortável, restaurando a umidade vaginal. Lubrinat pode ser usado com preservativos. Lubrinat não contém fragrância, não contém parabenos, não possui sabor e não é agressivo. O que é o Hidratante Intravaginal com Hialuronato de Sódio? É uma formulação não hormonal em gel para o tratamento da secura vaginal, possui hialuronato de sódio, uma molécula natural, presente em muitos tecidos humanos e responsáveis pela manutenção de nível correto de hidratação nos tecidos, sendo, portanto, um reservatório natural do corpo para água, e é responsável por manter os níveis corretos de umidade e hidratação em ambientes sensíveis. O hidratante intravaginal possui lactato de sódio, é responsável pela manutenção do PH vaginal entre 3,5 e 4,5 fisiológico, evitando a proliferação de fungos e bactérias locais e eliminando coceiras, inflamações, infecções bacterianas e ardor decorrente da falta de hidratação vaginal. Quem pode utilizar? Hidratante intravaginal com Hialuronato de sódio foi desenvolvido especialmente para as mulheres que sofrem de secura vaginal de várias origens, cujo epitélio vaginal não produz suficiente hidratação e, portanto, está propensa a coceira, inflamação, infecções bacterianas e relações sexuais dolorosas, assim como, após o parto, durante a menopausa, tratamentos com quimioterapias e períodos de estresses. Qual é a composição? Hialuronato de sódio, propilenoglicol, natrosol 250HHX, benzoato de sódio, metilparabeno, lactato de sódio, cremophor EL, ácido láctico, água deionizada. Como utilizar? É recomendado aplicações de 3 em 3 dias, reduzindo o espaçamento entre as aplicações caso seja necessário, sem causar danos à flora natural da vagina, ou, conforme orientação médica. Como sei que estou utilizando a quantidade correta? O aplicador descartável que acompanha o Hidratante Intravaginal possui um mecanismo que quando preenchido conforme instruções de uso fornece 3g de gel, quantidade indicada por aplicação. Pode ser utilizado como lubrificante íntimo antes da relação sexual? Sim, porém, se aplicado regularmente, não haverá necessidade da aplicação anterior ao ato sexual, já que o hidratante intravaginal é um tratamento para o ressecamento vaginal. Pode ser utilizado outros cremes vaginais? A utilização com outros cremes deve ser orientada pelo médico. Por quanto tempo deve-se utilizar? Pode ser utilizado de forma contínua ou a critério médico. Quais as precauções para utilização? Utilizar o Hidratante Intravaginal sob supervisão médica. Indicado somente para uso intravaginal. O produto poder ser utilizado durante a menstruação. Caso ocorra irritação local, suspenda o uso e procure o médico. Não utilizar o produto após a data de validade. Os aplicadores são descartáveis, após o uso inutilizá-los. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada. Manter fora do alcance das crianças. Conservar e armazenar o produto em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz, calor e umidade. Quais os efeitos indesejados do Hidratante Intravaginal? Até o momento não há relatos de efeitos indesejados com a utilização do Hidratante Intravaginal. Este produto é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da formulação. Como deve ser armazenado? Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C) e protegido da luz, calor e umidade.

M.S. 80288610005 (Produto para a saúde) - Registrado por: Master Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. www.masterfarmaceutica.com.br - SAC 0800-777-4444. Comercializado por: Merck S/A