

KELUS

Gel de silicone para
redução de cicatrizes



O que é Kelus? KELUS é um gel de silicone transparente e autossicante que mantém o equilíbrio hídrico da pele, facilitando a regeneração de cicatrizes causadas por cirurgias, queimaduras ou traumas.

Quais as vantagens do uso de Kelus? KELUS promove redução de cicatrizes hipertróficas e queloides, alívio do prurido e desconforto relacionados ao processo cicatricial e normalização da pigmentação da cicatriz.

Qual a composição de Kelus? Polissiloxanos e dióxido de silicone.

Quando utilizar Kelus? KELUS deve ser utilizado para redução de cicatrizes, quando o ferimento estiver completamente fechado ou após a remoção das suturas (pontos). KELUS também pode ser utilizado para prevenção de formação de queloides em cirurgias, traumas e queimaduras.

Quem pode utilizar Kelus? KELUS é indicado para crianças e adultos, mesmo com pele sensível.

Como utilizar Kelus? KELUS é um gel para uso externo. Limpe a área a ser tratada com água e sabão neutro, secando-a em seguida. Aplique uma camada fina de KELUS, cobrindo toda a área afetada, duas vezes por dia. Deixe secar por 4 a 5 minutos. Evite o contato com roupas ou cosméticos até que ocorra a completa secagem do produto, de modo a evitar manchas. Caso observe resíduos de KELUS após o tempo de secagem, retire o excesso de produto aplicado e deixe o restante secar na pele normalmente.

Por quanto tempo deve-se utilizar Kelus? Recomenda-se a utilização mínima por dois meses. Benefícios adicionais podem ser atingidos com o uso prolongado do produto. Para cicatrizes maiores e mais velhas, pode ser recomendado o uso continuado e por mais tempo se a melhora for vista após os 90 dias iniciais.

Quais as precauções para utilização de Kelus?

Não utilizar em feridas abertas ou incisões recentes.

Não aplicar em mucosas (nariz, boca ou perto dos olhos). Não aplicar sobre a mesma área após utilização de antibióticos tópicos ou outros produtos para a pele.

Não utilizar em caso de solução de continuidade da pele.

Quais os efeitos indesejados de Kelus? Raramente poderá ocorrer vermelhidão, dor ou irritação na pele. Caso isto ocorra, suspenda o uso e consulte seu médico.

Como Kelus deve ser armazenado? Mantenha fora do alcance das crianças e em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Comercializado por: **MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.**

Rua Projetada PS, 333 - Varginha-MG

CNPJ 14.806.008/0003-16

Fabricado por: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Rod. Pres. Castello Branco, Km 35,6 - Itapevi/SP

CNPJ: 61.190.096/0008-69 - Indústria Brasileira

Registro ANVISA nº: 80164799011

Farm. Resp.: Dra. Vanessa Confessori Martins - CRF-SP 80.299

Central de Relacionamento

0800-703-1550

www.momentafarma.com.br

central@momentafarma.com.br